

Avance[®] Solo

Leidraad voor het kiezen en aanbrengen van Avance Solo NPWT-verbanden

1. Hoe groot is het wondgebied?

Het wondgebied en de hoeveelheid exsudaat bepalen de geschikte verbandgrootte.

2. Hoe diep is de wond?

De wond mag niet dieper zijn dan of gelijk aan 2 cm.

3. Wat is de hoeveelheid exsudaat?

Avance[®] Solo-verbanden zijn geschikt voor het behandelen van een **weinige tot matige hoeveelheid** exsudaat. Om de hoeveelheid exsudaat te bepalen, **wordt de draagtijd van het verband vóór NPWT** als leidraad gebruikt.

Kies negatieve druk op basis van het aantal verbandwissels:

Veel exsudaat

Verbandwissel om de 1-2 dagen



← tNPWT →

Matig exsudaat

Verbandwissel om de 3-4 dagen



← Avance Solo →

Weinig exsudaat

Verbandwissel om de 5-7 dagen



← Zonder canister →

Referentie afbeelding: Svensson A., Single use negative pressure wound therapy (suNPWT) system with controlled fluid management technology – an evaluation of performance. Wounds Int. 2021, Vol 12 Issue 14

4. Beoordeel de toestand van de huid rond de wond


- Bescherm de kwetsbare huid rond de wond
- Zorg dat de huid rond de wond schoon en droog is voor het aanbrengen
- Verwijder oliën en resten van vochtinbrengende producten met alcohol.

5. Bepaal de verbandgrootte

Bij weinig exsudaat mag de wondgrootte **tot 50 %** van de verbandgrootte bedragen.

Bij matig exsudaat mag de wondgrootte **tot 25 %** van de verbandgrootte bedragen.

Weinig exsudaat

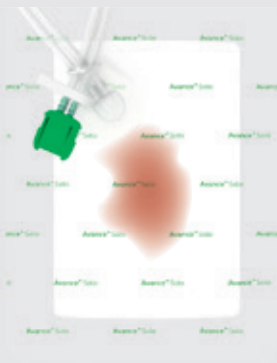

Afmetingen verband:
15x20cm
Afmetingen wondkussen:
10x15cm
Wondgrootte:
75cm²


Matig exsudaat



Afmetingen verband:
15x20cm
Afmetingen wondkussen:
10x15cm
Wondgrootte:
38cm²




Afmetingen verband:
25x25cm
Afmetingen wondkussen:
20x20cm
Wondgrootte:
200cm²

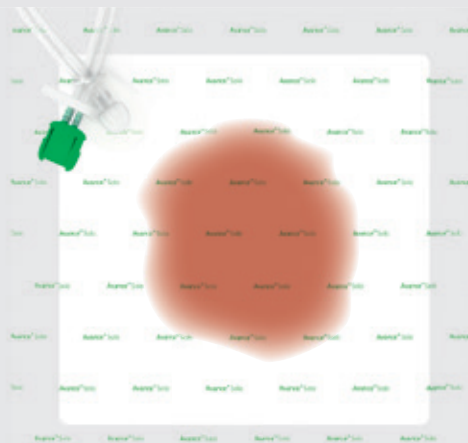

Afmetingen verband:
25x25cm
Afmetingen wondkussen:
20x20cm
Wondgrootte:
100cm²

U vindt het volledige assortiment verbanden dat in uw land verkrijgbaar is op www.avancesolo.com

Voor meer tips en advies over het aanbrengen van het verband:
AvanceSolo.com/tipsandtricks

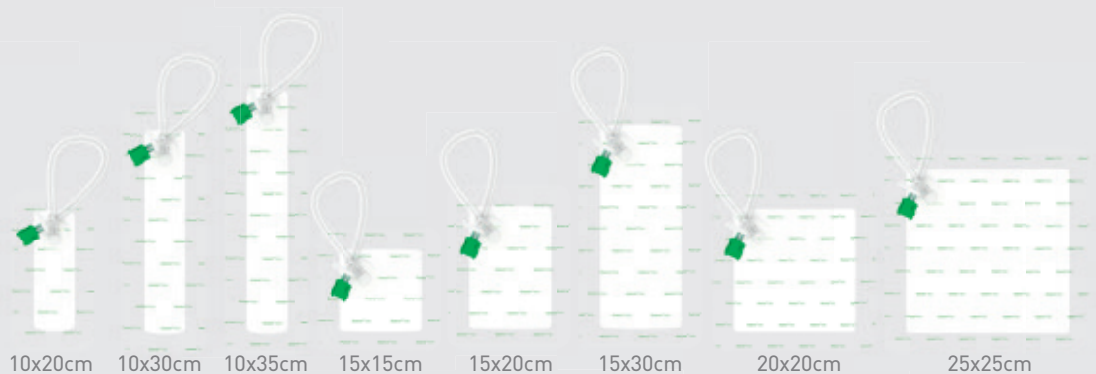

Meer informatie op www.molnlycke.be of www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, 2600 Berchem, België. Tel. +32 (0)3 286 89 50.
Mölnlycke Health Care B.V., Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Tel: +31 76 521 96 63.
De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke, Avance en Safetac zijn wereldwijd geregistreerd door een of meer bedrijven van de Mölnlycke Health Care Group. © 2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.
NLWC00032305 - BNWC00032305

